


Kernel Multi™ Check

Glucose
Cholesterol



Glucose

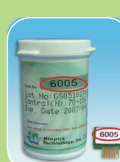

Glucose
bepaling
uitvoeren

Controleer Code
nummers

Plaats de
code sleutel



Meter start
automatisch
plaats teststrip



Verzamel druppel bloed



Bloed
toevoegen
aan strip

10 seconden
resultaat



Draai de dop van de pen



Stel de gewenste diepte in
om te kunnen prikken



Plaats lancet



Span de pen door
deze naar achteren te trekken



Verwijder bescherming



Spannen tot u klik hoort
en laat de pen los



Plaats de dop op de pen

Cholesterol



Cholesterol
bepaling
uitvoeren

Controleer Code
nummers

Plaats de
code sleutel



Meter start
automatisch
plaats teststrip



Verzamel druppel bloed



Bloed
toevoegen
aan strip

150 seconden
resultaat



MultiCheckÊ

Meer info over uw meter?

web: <http://www.multicheck.nl>

mail: info@multicheck.nl

Exclusieve distributie Nederland en België:
Testjezelf.nu BV
Hekkehorst 3
7207 BS Zutphen
Nederland



Ê 2010 Testjezelf.nu BV